

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Fassisi BoDia gyorseszteszt borjúhasmenésre

Rotavírus, Coronavírus, E. Coli K99 és Cryptosporidium parvum párhuzamos kimutatására

A TESZT KIVITELEZÉSE:

A mintavétel történhet a pipettával vagy a kék pálcával, a bélsár konzisztenciájától függően. (A pipettát csak híg bélsár esetén használja.) Szívjon fel egy kevés folyadékot a bélsárból. Nyissa ki a mintacsövecskét és tegyen bele 3 cseppet a mintából. (A cseppek mennyisége a bélsár konzisztenciájától függ. Kevésbé szilárd bélsár esetén több csepre van szükség). Zárja be a mintacsövecskét és rázza meg. A reagens színe megváltozik ha elegendő mintát alkalmazott. (Ellenkező esetben adjon további max. 5 cseppet a mintacsöbe.) Húzza le a fehér védőkupakot és törje le a cső hegyét. Cseppentsen 4-4 cseppet a tesztkazetta mintanyílásaiba.

KIÉRTÉKELÉS:

A teszt 10 perc múlva kiértékelhető.

Pozitív eredmény:

Két piros színű csík jelenik meg a tesztkazetta reakcióablakában a tesztcsíkon. A reakcióablakban a C és a T jelnél megjelenő piros csík pozitív eredményt jelent. A megjelenő kontrollcsík (C jelnél) a teszt korrekt kivitelezését jelenti.

Negatív eredmény:

Csak egy piros színű csík jelenik meg a tesztkazetta reakcióablakában a tesztcsíkon a C jelnél és nincs piros csík a T jelnél, az eredmény negatív.

TÁROLÁS ÉS ELTARTHATÓSÁG:

- ne fagyassza le a tesztet
- 2 és 30°C között tárolandó
- ne használja a tesztet a lejáratidőn túl
- a tesztet a használatig tartsa a védőcsomagolásban
- lejáratidő: ld. a dobozon

GYÁRTÓ:

Fassisi, Gesellschaft für Veterinär diagnostik und Umweltanalysen mbH

Marie-Curie-Straße 7, 37079 Goettingen, Germany

Tel: +49 551 500 880 40, Fax: +49 551 500 88 43 0, e-mail: info@fassisi.de

FORGALMAZÓ:

Medicus Partner Kft.

2051, Biatorbágy, Vendel park, Tormásrét u. 12.

Tel: 23 530 540, web: www.vetcentre.com